

beurer

HK 55 Easyfix

CZ



CZ Ohřivací podušky
Návod k použití

Vysvětlivky značek na etiketě



Přečtěte si upozornění



Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické požadavky standardu Öko-Tex 100, jak bylo doloženo výzkumným textilním institutem Testex, Zürich.

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky: 1 vyhřevná poduška, 1 spínač, tento návod k použití

1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví, resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Tuto vyhřevnou podušku používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- Tato vyhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Nesmí ji používat nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Příliš dlouhé použití může vést k popáleninám kůže.
- Pozor! Nikdy nesmíte usnout, je-li vyhřevná poduška v provozu.
- Vyhřevnou podušku nepoužívejte na zanícené, poraněné nebo oteklé části těla. V případě pochybností je třeba se před použitím poradit s lékařem.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto vyhřevnou poduškou mohou za určitých okolností narušovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tento výrobek, informujte se raději u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tuto vyhřívanou podušku
 - připojujte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
 - nenechávejte zapnutou bez dozoru,
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
 - nepřiskřípněte,
 - neohýbejte ostře,

- nepoužívejte pro zvířata,
- nepoužívejte ve vlhkém stavu,
- provozujte pouze s typy spínačů uvedenými na podušce.
- Elektronické součásti ve vypínači výhřevné podušky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté výhřevné podušce.
- Netahejte za kabely, nekruťte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do výhřevné podušky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato výhřevná poduška nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto příkrývku bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výhřevnou poduškou nebudou hrát.
- Výhřevnou podušku je třeba často průběžně kontrolovat, zda nejeví známky opotřebenění nebo poškození. V případě opotřebenění, poškození, poškození kabelů nebo nesprávného používání výhřevné podušky je třeba ji před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Opravy smějí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznaná opravářská dílna, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

2. Používání k určenému účelu

Tato výhřevná poduška je určena k zahřívání lidského těla. S touto výhřevnou poduškou můžete cíleně využívat tepla. Teplo podporuje prokrvení a uvolňuje svalstvo. Tato výhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmějí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemohoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata.

Tato výhřevná poduška z prodyšného veluru je velice přizpůsobivá a příjemná na dotyk.

Díky odnímatelnému spínači je možné výhřevnou podušku prát v pračce (viz pokyny k čištění).

Při prvním použití může výhřevná poduška zapáchat po plastu, tento zápach však brzy zmizí.

Tato výhřevná poduška je určena pro univerzální použití. Například v místě břicha, zad, kloubů a šije.

Při použití v oblasti šije může být poduška použita ve svinutém stavu.

Vytažitelné konce suchého zipu umožňují obzvláště snadné upevnění na tělo. Díky pryžovému popruhu výhřevná poduška vždy optimálně přiléhá.

3. Obsluha

3.1 Bezpečnost

Tato výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická senzorová technika zabraňuje přehřátí výhřevné podušky na celé ploše prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém automaticky vypne výhřevnou podušku v případě poruchy, indikace teplotního stupně na spínači nebude svítit, ani když bude poduška zapnutá. V takovém případě nesmí být výhřevná poduška z důvodů bezpečnosti dále používána a musí být odeslána k opravě na uvedenou servisní adresu.

3.2 Volba teploty

Nejrychlejšího zahřátí ohřívací pokrývky docílíte tak, že předtím nastavíte nejvyšší teplotní stupeň. Později lze v případě potřeby přepnout na nižší teplotní stupeň. Po zapnutí výhřevné podušky indikace zvoleného teplotního stupně nejprve krátce blikne a poté se rozsvítí. Při déle trvajícím použití výhřevné podušky doporučujeme nejnižší teplotní stupeň.

3.3 Teplotní stupně

Stupeň: 0 vypnuto

- 1 minimální teplo
- 2 střední teplo
- 3 maximální teplo

3.4 Rychlý ohřev

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí rychlého ohřevu, což se projevuje jejím rychlým nahřáním během prvních 10 minut.



3.5 Vypínací automatika

Výhřevná poduška se po cca 90 minutách automaticky vypne. Indikace teplotního stupně začne poté blikat. Pro opětovném zapnutí výhřevné podušky zvolte nejprve stupeň „0“ a teprve po cca 5 vteřinách požadovaný teplotní stupeň. Jestliže již výhřevnou podušku po časovaném vypnutí nebudete používat, vypněte ji (stupeň „0“) nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



4. Čištění a péče

Než začnete výhřevnou podušku čistit, vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Menší skvrny lze odstranit hadříkem nebo vlhkou houbou, případně s malým množstvím jemného tekutého pracího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.

Výhřevná poduška nesmí být chemicky čistěna, ždímana, strojově sušena, mandlována ani žehlena.


Před praním nejprve odpojte zástrčkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky. Pračku nastavte na šetrný prací program při 40°C.

Z ekologických důvodů Vám doporučujeme výhřevnou podušku prát vždy společně i s jinými textiliemi. Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

Výhřevná poduška je příliš častým praním namáhána. Výhřevná poduška by proto měla být prána v pračce max. dvacetkrát za celou dobu své životnosti.

Při sušení nepřipevňujte výhřevnou podušku pomocí kolíčků na prádlo apod., a v žádném případě ji nezapínejte!

Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá.

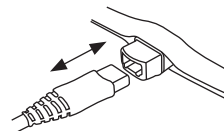

5. Skladování

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžkání.

Nechte výhřevnou podušku nejprve vychladnout.

6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



