

beurer

MG 150

CZ



CZ Přístroj pro masáž šíje
Návod k použití

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorech.

1. Seznámení

S tímto elektrickým masážním přístrojem si můžete účinně a bez cizí pomoci připravit příjemnou masáž. Masáže mohou mít uvolňující nebo povzbuzující účinky a používají se s oblibou v případech natažených svalů, bolestí a únavy. Přístroj umožňuje silnou a intenzivní masáž šíje a ramen.

Přístroj je určen pouze k **soukromému používání**, ne pro lékařské nebo komerční používání.

2. Použití k určenému účelu

Přístroj je určen výhradně k masáži šíje a ramen lidského těla. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících výstražných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás masážní přístroj vhodný, dotážete se svého lékaře.

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- v případě implantovaných elektrických přístrojů (jako např. kardiostimulátor)
- v případě voperovaných kovových implantátů
- u dětí a zvířat
- při chorobné změně nebo zranění v masírované oblasti těla (např. výřez meziobratlových plotének, otevřené rány),
- na hlavě nebo tvrdých částech těla (např. kosti a klouby)
- v obličejí (oči), na hrtanu a jiných zvláště citlivých částech těla
- na oteklých, spálených, zanícených nebo zraněných částech pokožky nebo těla,
- v místě tržné rány, kapilár, křečových žil, akné, kuperózy, oparu a výskytu jiných kožních nemocí,
- během těhotenství,
- během spánku,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
- při řízení automobilu.



Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj používat. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Před použitím masážního přístroje se dotážete svého lékaře

- pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci na horní části těla,
- při trombózách,
- při cukrovce,
- při bolestech nejasné příčiny.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě předejte současně i tento návod.



VAROVÁNÍ

Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Zásah elektrickým proudem



VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě vad nebo poruchách provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem. Kabel neskrípejte, nepřehýbejte ani jím nekroutte. Do kabelu nebo do přístroje nezapichujte jehly nebo ostré předměty.

Zajistěte, aby se masážní přístroj a síťový kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. Přístroj proto používejte pouze v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně).

Ze žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo z něj vytéká voda.

Přístroj nevystavujte žádným otřesům a nenechte jej spadnout.

Oprava



VAROVÁNÍ

- Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Zdrhovadlo masážního přístroje se nesmí otevírat. Používá se pouze z výrobně technických důvodů.
- V případě poškození kabelu je třeba nechat ho vyměnit autorizovaným prodejcem.

Nebezpečí požáru



VAROVÁNÍ

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Masážní přístroj proto nepoužívejte

- zakrytý, např. pod dekou, polštářem, ...
- v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

Zacházení s přístrojem



POZOR

Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Do přístroje nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat..
- Nesedějte, nelehejte ani nestoupejte plnou vahou na pohyblivé části přístroje a neodkládejte na přístroj žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

Likvidace

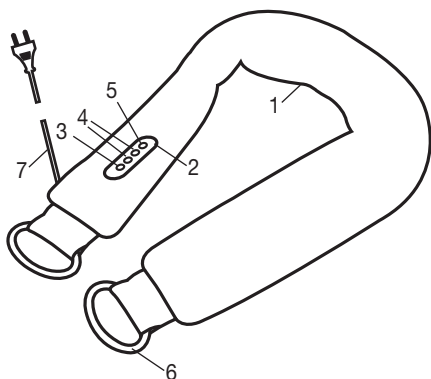


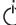
POZOR

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



4. Popis přístroje



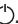
1. Masážní hlavice (spodní část přístroje)
2. Ovládací prvek
3. Tlačítko  s kontrolkou
4. Tlačítka +/-
5. Tlačítko Mode
6. Rukojeti
7. Přívodní kabel

5. Uvedení do provozu

- Sejměte obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj nebo kabel nejsou poškozeny.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.

6. Obsluha

Masáž začíná vždy nejnižším stupněm a prvním masážním programem. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi 3 intenzitami masáže. Přístroj nabízí 6 různým masážních programů, které můžete nastavit pomocí tlačítka Mode. Vypnutím se přístroj vrátí zpět do výchozí polohy, takže při dalším zapnutí masáž opět začíná prvním masážním programem při nejnižší intenzitě.

Pomocí rukojetí můžete zvýšit, popř. snížit přítlačný tlak a upravovat polohu přístroje. Pro vypnutí přístroje stisknete znovu tlačítko .

Upozornění

- Masážní přístroj používejte max. 15 minut. Při delší době masáže může vést nadměrná stimulace svalů k přetažení namísto uvolnění.
- Jednotka má automatické vypnutí, která je nastavena na maximální provozní době 15 minut.
- Před dalším použitím nechejte přístroj alespoň 15 minut zchladnout.
- Masážní přístroj má zabudovanou ochranu proti přehřátí, díky níž se přístroj v případě přehřátí automaticky vypne. V tomto případě nechte přístroj 30 minut zchladit, než ho opět začnete používat.

7. Péče a skladování

Čištění



VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se nesmí dostat tekutina do přístroje.
- Menší skvrny lze odstranit vlhkou utěrkou. Prosím čistěte výhradně vrchní stranu přístroje.
- Přístroj znovu použijte, pokud je zcela suchý.

Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžkání.

